


## KANN IN NUR 4 MINUTEN UND 4 SCHRITTEN ANGELEGT WERDEN!


**SCHRITT 1: UNTERZUG ANBRINGEN**  
Z.B. KREWI-FROTTIER POLSTERSCHLAUCH

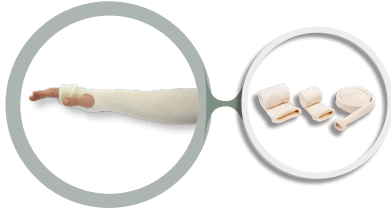


**SCHRITT 2: KREWI-FRACT SCHIENE AKTIVIEREN**  
Z.B. IM DAMPFGERÄT



**SCHRITT 3: KREWI-FRACT ANFORMEN**  
Z.B. KREWI-FRACT MITTELHANDSCHIENE

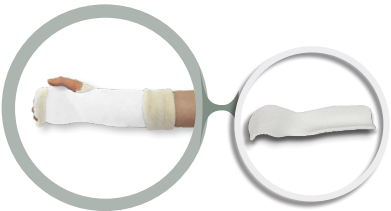

**SCHRITT 4: MIT EINER HAFTBINDE FIXIEREN**  
Z.B. KREWI-MULL HAFT COLOR

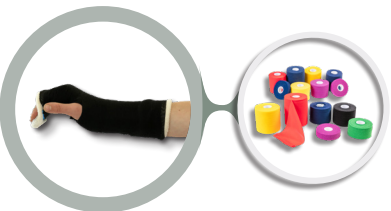

Rufen Sie uns unter **02154/91242-0**

an, um weitere Informationen zu

erhalten oder senden Sie uns

eine E-Mail an [verkauf@krewi.com](mailto:verkauf@krewi.com)

**KREWI**<sup>®</sup>

Medical Produkte GmbH

**KREWI Medical Produkte GmbH**

Siemensring 78a

47877 Willich

Telefon 02154/91242-0

Fax 02154/427691

E-mail: [verkauf@krewi.com](mailto:verkauf@krewi.com)

[www.krewi.de](http://www.krewi.de)

Version.KFB.FY.2022.03\_rev01



**KREWI-FRACT**  
Thermoplastische  
Schiene

[WWW.KREWI.DE](http://WWW.KREWI.DE)



Ihr Produktspezialist  
in Deutschland

## WÜNSCHEN SIE SICH...



...zusätzlich mehr Zeit, um mehr Patienten effektiv behandeln zu können?



...eine Minimierung der Kontaktzeit pro Patienten?



...eine saubere Behandlungsalternative zum Cast- und Gipsverband?

Dann ist KREWI-fract  
**IHRE LÖSUNG!**



**Bestehend aus PVA-SCHAUM -**

**100% biologisch abbaubar**

## ZAHLREICHE INDIKATIONEN - EINE LÖSUNG!



OBERARMSCHIENEN



HANDGELENKSCHIENEN



DAUMENSCHIENEN



UNTERSCHENKEL-  
SCHIENEN



KNIELAGERUNGS-  
SCHIENEN



OBERSCHENKEL-  
SCHIENEN

Viele weitere Schienen  
finden Sie online:



Weitere Informationen unter:  
[WWW.KREWI.DE](http://WWW.KREWI.DE)

### **i** SERVICEPAKET: DAMPFGERÄT

Sie können zusätzlich ein **Dampfgerät** auf Mietbasis erhalten.

**Reparaturen** oder sogar ein **Austausch** der Geräte werden von uns **kostenfrei** übernommen.



ZEIT- UND KOSTENSPAREND -  
**KANN IN NUR 4 MINUTEN  
ANGELEGT WERDEN!**

### Individuell anformbar

KREWI-fract kann patientenindividuell angeformt und angepasst werden.  
**Kann in nur 4 Minuten angelegt werden!**



### Effizient behandeln

KREWI-fract Schienen sind **röntgenstrahlendurchlässig**, sodass sie beim Röntgen nicht abgenommen werden müssen.  
Sie **sparen sich mehrere Arbeitsschritte.**



### Geringer Versorgungsaufwand

Die Schiene „atmet“, wodurch Transpirationen und Hautirritationen gesenkt werden können. Dadurch **vermeiden** Sie weitere **aufwendige Schienenwechsel.**

