

Niederländische Erfahrungen mit dem "Zeltbett";
Ergebnisse einer nationalen Umfrage ⁽³⁾

April 2017

177 Klinische Geriater

M. Kattenbelt

Ergebnisse:

- Patienten zeigen weniger Zeichen für motorische Unruhe in "Zeltbetten" ⁽³⁾
- Patienten schlafen besser ⁽³⁾
- Die Verabreichung von Psychopharmaka kann reduziert werden ⁽³⁾
- Stürze konnten reduziert werden ⁽³⁾
- Angehörige nehmen "Zeltbetten" positiv an ⁽³⁾



SCAN MICH!

Quellenverzeichnis

(1) Drs. Pieter W. Molleman et al (Drs. P.W. Molleman, GZPsychologe/Neuropsychologe; J.B.M. van Kesteren, Pflegefachkraft; Dr. C.J.M. Ubink-Bontekoe, bio-medizinischer Wissenschaftler; Drs. M. P. D. Zoomer-Hendriks, Facharzt für Geriatrie; Dr. Roland Wetzels, Facharzt für Geriatrie), Ned Tijdscher Geneskd . 2015;159: A9617" Sept.2015

(2) Cindy Wagner, RN, BC,MS,CNS et all, Use of the Posey Bed in Acute Care, Columbus, OH, April 2007

(3) M. Kattenbelt, R.W.M.M. Jansen et all, 2017-3-Ins&outs - Tijdschrift voor Geriatrie,2017

(4) Dawn Walters, MS, RN, Vice-President of Behavioral Health and Rehabilitation Services Erie County Medical Center,Buffalo, New York, Enclosure bed: A tool for calming agitated patients, American Nursing, September 2017 Vol. 12 No.

Rufen Sie uns unter **02154/91242-0**

an, um weitere Informationen zu

erhalten oder senden Sie uns

eine E-Mail an verkauf@krewi.de

Version.FSPZ.FY.2021.09_rev01



FeelSafe Pro Zeltbett
Ihr Produktspezialist für
Patientenschutz

WWW.KREWI.DE

Patienten schlafen besser

Minimierung von Stürzen

Hergestellt in Europa

Ihr Produktspezialist
in Deutschland

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN STUDIEN UNTER:
WWW.KREWI.DE/ZELTBETT



Bitte beachten Sie, dass für die Verwendung des FeelSafe Pro Zeltbetts mit geschlossenen Zugängen ein richterlicher Beschluss benötigt wird.

Vertrieb durch:



Medical Produkte GmbH
KREWI Medical Produkte GmbH
Siemensring 78a
47877 Willich
Telefon 02154/91242-0
Fax 02154/427691
email: verkauf@krewi.de
www.krewi.de



Human Protection B.V.
Droogdokkeneiland 15
5026 SP Tilburg,
Niederlande
Tel. +31 (0)13-536 38 07



Komfort, Fürsorge, Sicherheit

Kontrollierbar sicherer Bereich mit Bewegungsspielraum

- Das FeelSafe Pro Zeltbett erhält dem Patienten einen gewissen Bewegungsspielraum
- Das Matratzenfach schließt die Einklemmungsgefahr zwischen Matratze und Bettgitter/Kopfteil/Fußteil aus
- Das FeelSafe Pro Zeltbett kann den Bedarf an Beruhigungsmitteln reduzieren ^{(1) (3)}

Strapazierfähiges Zeltgewebe

- Das Zelt kann entfernt und gereinigt werden
- Öffnung von vier Seiten möglich

Besserer Schlaf

- Bietet eine sichere und kontrollierte Umgebung für kognitiv beeinträchtigte Personen, die sich darin meist sehr wohl fühlen und somit zufrieden und entspannt schlafen ^{(1) (2) (3)}
- Von Patienten als sichere Rückzugsmöglichkeit empfunden ⁽¹⁾

Maximale Bewegung

- Volle Mobilität
- Gesicherte Reißverschlüsse und gepolsterte Rahmen schützen vor Selbstverletzung
- Durchführung von Schläuchen oder einer Rufklingel möglich



ÖFFNUNGEN
Öffnung für Rufklingel und Patientenzugänge jeder Art



GEPOLSTETER RAHMEN
Die Rahmen sind innen und außen gepolstert, um Verletzungen durch z.B. Kopfstoßen zu minimieren



MATRATZENFACH
Bei der Matratze wird in ein speziell integriertes Matratzenfach eingelegt, um der Erstickungsgefahr entgegenzuwirken



WIEDERBELEBUNGSEHEL
Bei einem Code Blue bringt die Betätigung des angebrachten CPR-Hebels die Liegefläche sekundenschnell in eine flache Position



EINSTELLBARE LIEGEFLÄCHE
Die Liegefläche kann mittels Handsteuergerätes in beliebige Positionen gebracht werden



4 ZUGÄNGE
Das Zeltbett besitzt vier Öffnungen, die je nach Bedarf geöffnet und geschlossen werden können



ZENTRALVERRIEGELUNG
Die Zentralverriegelung befindet sich am Fußende und kann bei Bedarf mit dem Fuß betätigt werden



GROßER ARBEITSBEREICH
Die Betthalterung ist in der Mitte der seitlichen Rahmen positioniert, um einen größeren Arbeitsbereich zu gewähren

STUDIEN

Neue Techniken in der Medizin ⁽¹⁾

Frühjahr 2012

24 Personen

Dr. Pieter W. Möllemann

Ergebnisse:

- Die Patienten schliefen besser und waren besser ausgeruht ⁽¹⁾
- Patienten waren besser ausgeruht ⁽¹⁾
- Patienten hatten weniger Verhaltensprobleme und waren weniger aggressiv aufgrund des Gefühls der Sicherheit im geschlossenen Bettssystem ⁽¹⁾
- Chemische Fixierungen konnten reduziert bzw. ganz gestoppt werden ⁽¹⁾

6-monatige Beobachtungsstudie des Doctors Hospital in Columbus, Ohio ⁽²⁾

April 2007

24 Personen

Cindy Wagner

Ergebnisse:

- Unruhezustände bei Patienten werden reduziert ⁽⁴⁾
- "Zeltbetten" sorgen dafür, dass Patienten besser schlafen ⁽⁴⁾

