


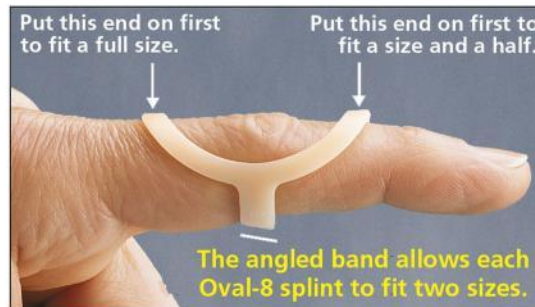

OVAL-8 Größenbestimmung

Die Oval-8 Größenbestimmung wird Ihnen helfen, die passende Größe der Oval 8 Schiene zu finden. Da auch leichte Schwellungen oder Temperaturveränderungen die Fingergröße beeinflussen können, kann die Größenbestimmung keine 100% Genauigkeit garantieren. Wir empfehlen die Bestellung eines Sets aus 3 Größen für höhere Genauigkeit bei der Dimensionierung.




Größenbestimmung Anleitung

Um die Größenbestimmung zu verwenden, benötigen Sie eine Schere und ein Lineal. Schneiden Sie die unten stehende Zeichnung entlang der gestrichelten Linie aus und folgen Sie den Anweisungen.



Platzieren Sie den Knöchel mit Hilfe dieser Linie

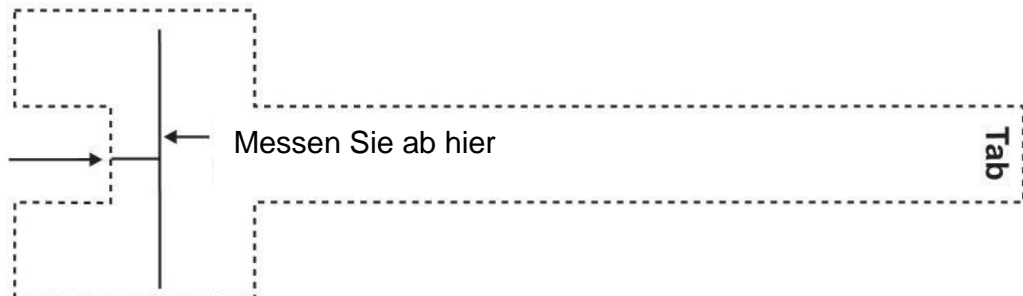

Siehe Seite 2 für Schritt-für-Schritt-Anleitungen.



Größenbestimmung Anleitung

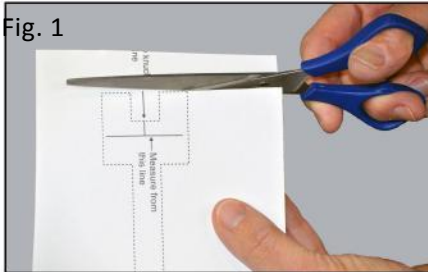


Fig. 1
Schneiden Sie die Größenbestimmung entlang der gestrichelten Linie aus.

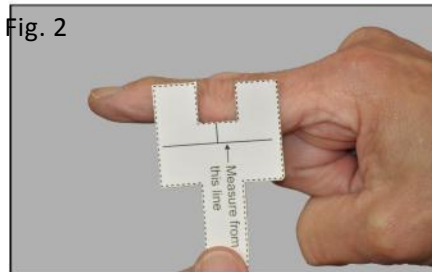


Fig. 2
Platzieren Sie den Knöchel genau in der Mitte der kurzen Linie.

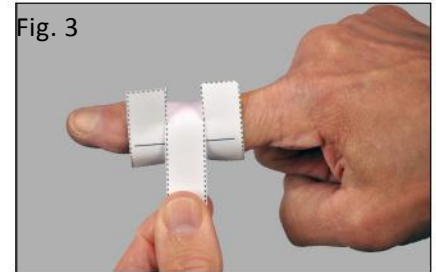


Fig. 3
Legen Sie den langen Streifen um den Knöchel herum, bis der Streifen die Messlinie überlappt.

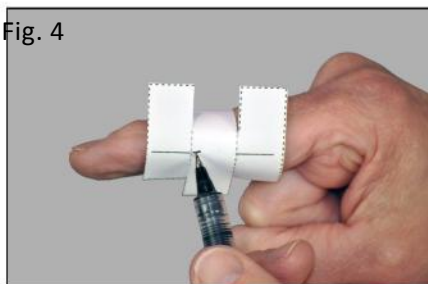


Fig. 4
Ziehen Sie leicht an dem Streifen, damit das Papier gleichmäßig um das Gelenk liegt. Zeichnen Sie die Messlinie auf dem Streifen weiter.

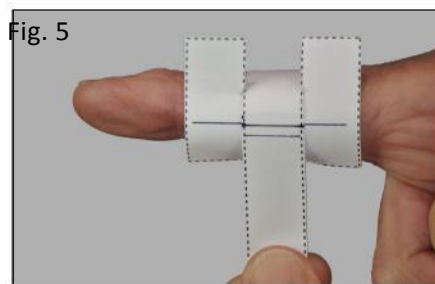


Fig. 5
Ziehen Sie den Streifen etwas fester an und zeichnen Sie eine weitere Linie für strammen Sitz ein.

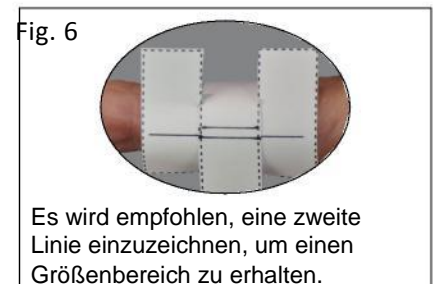


Fig. 6
Es wird empfohlen, eine zweite Linie einzuzichnen, um einen Größenbereich zu erhalten. Hierbei wird die spätere Passgenauigkeit optimiert.



Fig. 7
Nehmen Sie sich ein Lineal und messen Sie den Abstand von der Messlinie zu Ihren gezeichneten Linien.



Fig. 8
Mit diesen Zahlen (möglichst genaue mm) können Sie anhand der nächsten Seite die für Sie passenden Größen bestimmen.

*Die Größenbestimmung kann keine Garantie für 100% Passgenauigkeit darstellen. Durch Temperaturbedingungen, Schwellungen und Tageszeiten können die Fingergrößen variieren und von der bestimmten Größe abweichen.



Größenbestimmung Anleitung

Abgestufte Sets

Wenn Sie sich für eine Staffelung entscheiden, berücksichtigen Sie die folgende Punkte:

- Wenn Ihre Finger zu Schwellungen neigen, bestellen Sie eine Nummer größer
- Beabsichtigen Sie die Splints im Wasser zu tragen, bestellen Sie eine Nummer kleiner
- Müssen Sie kaltes Wetter berücksichtigen, kann eine Nummer kleiner besser passen
- Haben Sie eine Schwellung die zurückgeht/gehen wird, nehmen Sie ein Set mit kleineren Größen

Set aus 3 Splints	Größen	Set aus 3 Splints	Größen
Größen 2-3-4	1 3/4" - 1 15/16" (4.3 to 4.95 cm)	Größen 8-9-10	2 7/16" - 2 11/16" (6.4 - 6.8 cm)
Größen 4-5-6	1 15/16" - 2 3/16" (4.95 - 5.7 cm)	Größen 10-11-12	2 11/16" - 2 15/16" (6.8 - 7.4 cm)
Größen 6-7-8	2 3/16" - 2 7/16" (4.7 - 6.14 cm)	Größen 13-14-15	3" - 3 1/4" (7.65 - 8.2 cm)

Die Sets aus 3 Splints sind in Deutschland leider nicht verfügbar.

Individuelle Splints

Wurde die Größenbestimmung von einem Arzt oder anderem Leistungserbringer vorgenommen und Sie kennen Ihre genaue Größe, oder Sie möchten lediglich eine Größe kaufen, finden Sie hier die Größen der einzelnen Splints.

Oval-8 Größe	Größe	Oval-8 Size	Größe	Oval-8 Größe	Größe	Oval-8 Größe	Größe
2	1 3/4" (4.3 cm)	6	2 3/16" (5.7 cm)	10	2 11/16" (6.82 cm)	14	3 3/16" (8.09 cm)
3	1 13/16" (4.5 cm)	7	2 5/16" (5.86 cm)	11	2 13/16" (7.09 cm)	15	3 1/4" (8.2 cm)
4	1 15/16" (4.95 cm)	8	2 7/16" (6.14 cm)	12	2 15/16" (7.4 cm)		
5	2 1/6" (5.27 cm)	9	2 1/2" (6.35 cm)	13	3" (7.65 cm)		

Für Bestellungen in Deutschland:



Krewi® Medical Produkte GmbH
 Siemensring 78 a · 47877 Willich
 Tel.: 02154/912420 · Fax: 02154/427691
 E - Mail : Krewi@Krewi.de