


Anleitung von Fixierbändern

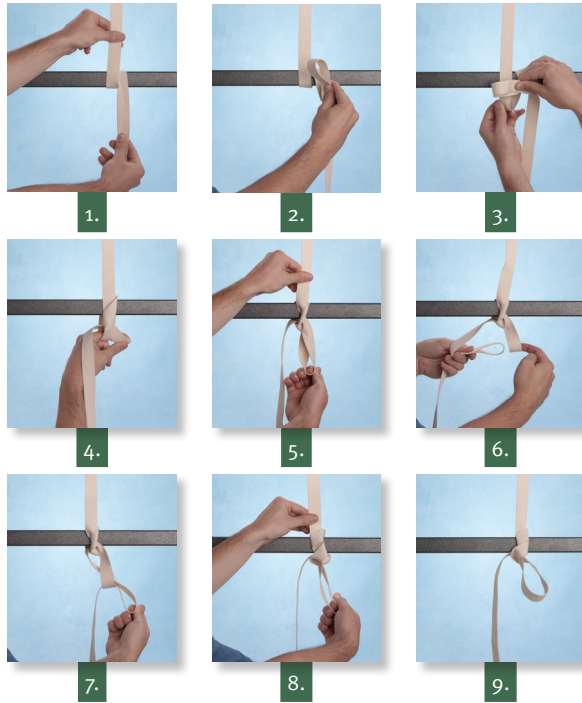

Rufen Sie uns unter **02154/91242-0**
an, um weitere Informationen zu
erhalten oder senden Sie uns
eine E-Mail an verkauf@krewi.com



Medical Produkte GmbH

KREWI Medical Produkte GmbH

Siemensring 78a

47877 Willich

Telefon 02154/91242-0

Fax 02154/427691

E-Mail: verkauf@krewi.com

www.krewi.de

Version.FM.FY.2023.01_rev01



FIXIERMANSCHETTEN
Mit Klickverschluss
& Klettverschluss

WWW.KREWI.DE

**SCHNELLE &
SICHERE
ANLAGE**

**HOHE
ZUGKRAFT**

**GEPOLSTERT
&
WEICH**



Ihr Produktspezialist
in Deutschland

1. Das Band um eine belastbare Stelle am Bett legen.
2. Bilden Sie mit der rechten Hand eine Schlaufe.
3. Ziehen Sie mit der linken Hand das Band soweit, dass die Schlaufe hindurch gelegt werden kann.
4. Die Schlaufe mit der rechten Hand durch das Loch legen.
5. Ziehen Sie mit der linken Hand das Band fest.
6. Bilden Sie mit der linken Hand eine zweite Schlaufe und legen Sie diese durch die erste Schlaufe.
7. Ziehen Sie mit der rechten Hand die vorher gelegte Schlaufe fest.
8. Ziehen Sie den Knoten jetzt fest, so dass am Bandende die Schlaufe aufgezogen werden kann.
9. Fertig

WÜNSCHEN SIE SICH...



...eine schnelle und sichere Applikation von Fixiermanschetten?



...Fixiermanschetten, die bei der Anwendung eine hohe Sicherheit bieten?



...Fixiermanschetten, die Reibungen minimieren und sich angenehm auf der Haut anfühlen?

Dann sind unsere
Fixiermanschetten
IHRE LÖSUNG!

BEWEGLICHES BAND

Minimieren Reibungen und
Hautirritationen beim Drehen

EINWEGARTIKEL

FIXIERMANSCHETTEN MIT KLETTVERSCHLUSS



FIXY CW/CA



FIXY SINGLE STRAP



FIXY DOUBLE STRAP

ZWEI
BÄNDER



FIXY LM

FIXIERMANSCHETTEN MIT KLIKKVERSCHLUSS



FIXY QR



FIXY QR3

ZWEI
BÄNDER

Hoher Tragekomfort

Die Fixiermanschetten fühlen sich weich und angenehm auf der Haut des Patienten an. Ein **hoher Tragekomfort**, um Wunden durch **Reibungen zu vermeiden**.



Hohe Zugkraft - Hohe Sicherheit

Die hohe Zugkraft und Reißfestigkeit ermöglicht eine **optimale Sicherheit** bei der Verwendung der Fixiermanschetten.



Schnell und sicher befestigen

Mit dem integrierten Klickverschluss können unsere Fixiermanschetten in wenigen Sekunden **sicher und schnell** angebracht werden. **Kein aufwendiges Knoten notwendig.**



FIXIERMANSCHETTEN
WEITERE INFORMATIONEN
FINDEN SIE ONLINE UNTER:
www.krewi.de

