

Anlagehinweise HM CAST ROLLCAST:

(Beispielhafte Darstellung zur Versorgung einer Scaphoidfraktur)




1. Schritt

Rollen Sie den Unterzug auf. Stülpen Sie diesen über die Hand und rollen ihn im nächsten Schritt bis zum unteren Ende des Unterarmes ab.



2. Schritt

Vor der Anwendung Schutzhandschuhe anziehen. Nehmen Sie den HM Cast aus der Verpackung und rollen Sie diesen ebenfalls auf.

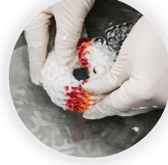

3. Schritt

Tauchen Sie den HM Cast für 5 Sekunden in Wasser (20-25°C) ein und drücken Sie diesen danach mehrere Male aus.



4. Schritt

Lassen Sie oben und unten ca. 3cm vom Unterzug überstehen. Rollen Sie den HM Cast übers Handgelenk und fixieren Sie ihn am Daumen mit einem Haltegriff und bringen Sie diesen in eine Funktionsstellung.



5. Schritt

Rollen Sie den restlichen HM Cast komplett aus. Schlagen Sie den Posterschlauch am Daumen sowie an den unteren Enden des restlichen HM Casts um. So werden die Kanten angemessen abgepolstert.



6. Schritt

Der HM Cast ist in 10-15 Minuten komplett ausgehärtet.

Rufen Sie uns unter **02154/91242-0**

an, um weitere Informationen zu

erhalten oder senden Sie uns

eine E-Mail an verkauf@krewi.com



Medical Produkte GmbH

KREWI Medical Produkte GmbH

Siemensring 78a

47877 Willich

Telefon 02154/91242-0

Fax 02154/427691

E-mail: verkauf@krewi.de

www.krewi.de

Version.HCR.FY.2022.02_rev01



HM CAST ROLLCAST
Maschenförmiger
Castverband

WWW.KREWI.DE

**SPRECHSTUNDEN-
BEDARF**

HM CAST ROLLCAST



JETZT SCANNEN!



Ihr Produktspezialist
in Deutschland

WÜNSCHEN SIE SICH...



... eine unkomplizierte
Anlage von zirkulären Castverbänden?



...eine Verkürzung der
Behandlungsdauer pro Patient?



...einen entspannteren Behandlungsablauf?

Dann ist der HM CAST ROLLCAST
IHRE LÖSUNG!

Glasfaserfrei | Kein Einatmen von Glasfaserpartikeln

Luftdurchlässig | Keine Hautirritationen




ZAHLREICHE INDIKATIONEN - EINE LÖSUNG



OBERE EXTREMITÄTEN



UNTERE EXTREMITÄTEN

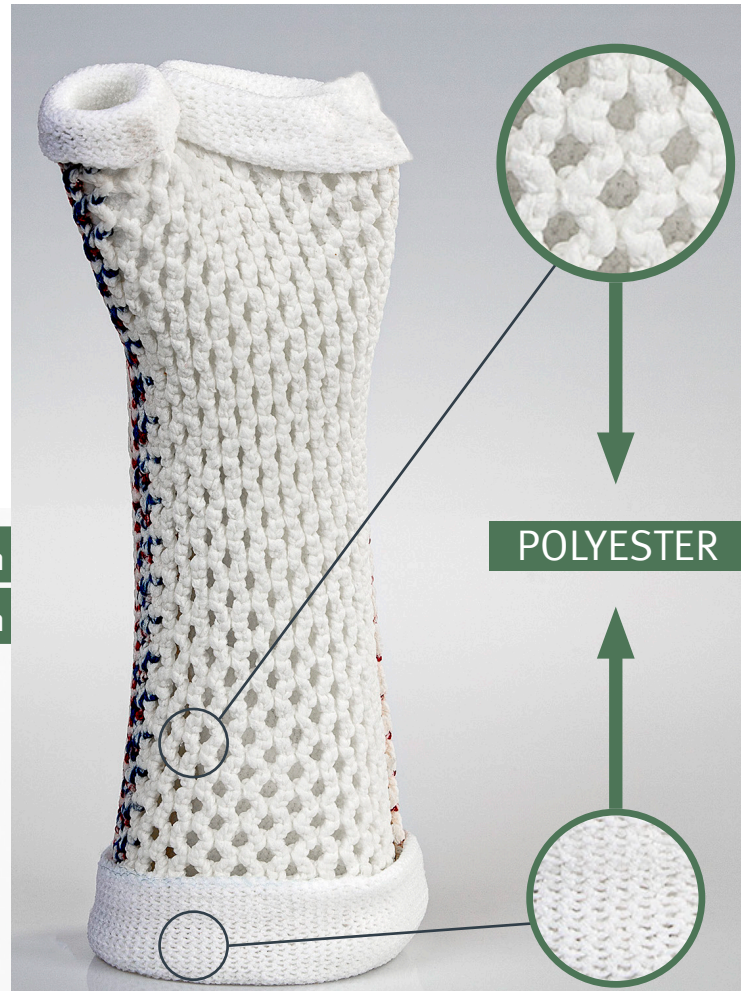

POLYESTER

ZEIT- UND KOSTENSPAREND - IN 3 MINUTEN ANGELEGT!

Schnell und unkompliziert anlegen

Der HM Cast Rollcast kann nach der Aktivierung wie ein Schlauchverband, **innerhalb weniger Sekunden schnell und einfach** über die Extremität gestülpt werden. Eine aufwendige zirkuläre Anlage ist nicht mehr notwendig.



Erleichtert die Behandlung

Der HM Cast Rollcast ist **röntgenstrahlendurchlässig**, sodass dieser beim Röntgen nicht abgenommen werden muss. Sie **ersparen sich mehrere Arbeitsschritte**.



Polsterschlauch inklusive

Ein vorgeschnittener **Polsterschlauch ist im Lieferumfang zusätzlich enthalten**. Sie müssen keinen Polsterschlauch zuschneiden oder sich um die Anschaffung eines Polsterschlauches kümmern.

