

STUDIENERGEBNISSE

Die Schutzhandschuhe sorgen dafür, dass sich Patienten keine Kanülen oder andere Zugänge herausziehen oder sich selbst oder dem Personal unbewusst Verletzungen zufügen können.

gungstherapie die Motorik nach einem Schlaganfall. Sie helfen Kontrakturen der Hand zu vermeiden und können durch die Mikrofaserfüllung in der Handtherapie helfen.

Sie verbessern im Rahmen der kontrollierten Bewe-

Durch Verhinderung der Dekannülierung werden Kosten und Personalaufwand eingespart.



Sicher vor Selbst- & Fremdverletzungen



Verbesserung der Ernährung



Einsparung von Kosten und Personalaufwand



Keine Freiheitsentziehende Maßnahme



Reduzierung der Aufenthaltsdauer



Reduzierung von Todesfällen

ERGEBNIS

Durchschnittsalter 81,5 Jahre in beiden Gruppen. 89% der Patienten hatten einen TACS (Total Anterior Circulation Stroke)⁽⁴⁾

	Mit Handschuhen	Ohne Handschuhe
Durchschnitt von Transnasalen Magensonden	7 (Mann Whitney, U = 13)	10 (p < 0.05)
Durchschnitt von Aspirationspneumonie	1 (U = 14,5)	2 (p < 0.05)
Durchschnittlicher Gewichtsverlust	0,7 KG (U=4)	5.2 KG (p < 0.05)
Aufenthaltsdauer	40 TAGE (U - 48.5)	48.5 TAGE (p= 0.15)
Todesfälle	2 (x2 = 3.545)	7 (p < 0.05)

⁽⁴⁾Y.-Y.K.Kee et al., Evaluating the use of hand mittens in post stroke patients who do not tolerate nasogastric feeding, Poster Session II – XVI. European Stroke Conference, Epsom and St Helier University Hospitals NHS Trust, 2007

Rufen Sie uns unter **02154/91242-0**
an, um weitere Informationen zu
erhalten oder senden Sie uns
eine E-Mail an verkauf@krewi.com



Medical Produkte GmbH

KREWI Medical Produkte GmbH

Siemensring 78a

47877 Willich


Telefon 02154/91242-0

Fax 02154/427691

E-Mail: verkauf@krewi.com

www.krewi.de

Version.SH.FY.2023.01_rev01

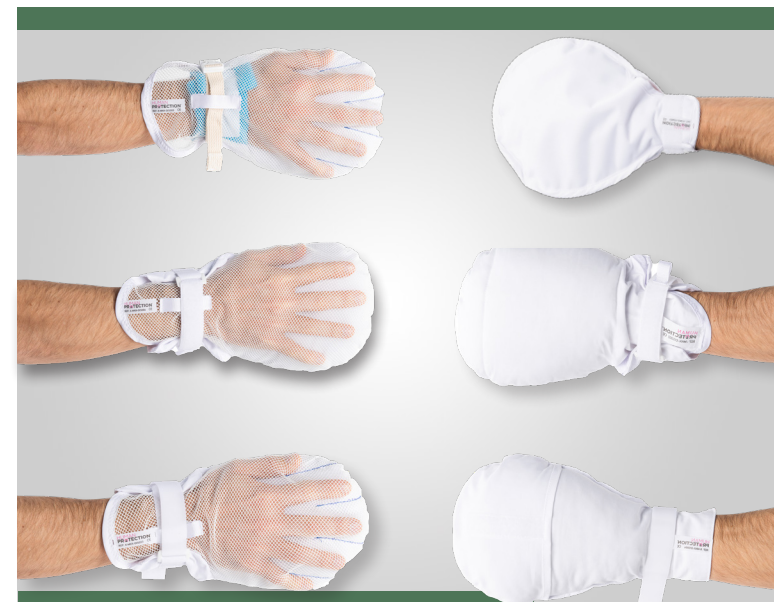

SCHUTZHANDSCHUHE
Mit Klickverschluss
& Klettverschluss

WWW.KREWI.DE

SCHNELLE & SICHERE ANLAGE

HOHER SCHUTZ

GEPOLSTERT & WEICH



Ihr Produktspezialist
in Deutschland

WÜNSCHEN SIE SICH...



...mehr Sicherheit für Patienten und Anwender ohne den Gebrauch von Fixierungen?



...Produkte, die effektiv vor Selbst- und & Fremdverletzungen schützen?



...eine Reduzierung von Todesfällen und der Aufenthaltsdauer von Patienten?

Dann sind unsere
Schutzhandschuhe **IHRE LÖSUNG!**

SCHUTZHANDSCHUHE MIT KLETT- & KLIKKVERSCHLUSS



MITTY THERAPY
Therapiehandschuh
mit Styroporperlen



MITTY SECURE
Doppelt gepolsterter
Handschuh mit
doppeltem
Klettverschluss



MITTY AIR BASIC
Handschuh mit Netz-
und Fingerseparatoren



MITTY CARE
Handschuh mit
Inspektionsöffnung



MITTY AIR PREMIUM
Handschuh mit
weichem Armband
und Fingerseparatoren



MITTY AIR
Handschuh mit Netz
und doppeltem
Klettverschluss



MITTY MINI
Handschuh mit
Inspektionsöffnung

Hoher Tragekomfort

Die Schutzhandschuhe sind **gepolstert** und fühlen sich **angenehm** auf der Haut des Patienten an.



Besseres Wohlbefinden

Schlaganfallpatienten können mithilfe der Handschuhe **Nahrung besser aufnehmen.**

Ebenfalls werden Verletzungen durch eine Dekubalierung minimiert. Dies begünstigt ein **besseres Wohlbefinden** beim Patienten.



Schnell und sicher befestigen

Mit dem integrierten Klick- oder Klettverschluss, können unsere Handschuhe in wenigen Sekunden **sicher und schnell** angebracht werden. **Keine komplizierter Knoten notwendig.**



KEINE FREIHEITSENTZIEHENDE MASSNAHME



SCHUTZHANDSCHUHE
WEITERE INFORMATIONEN
FINDEN SIE ONLINE UNTER:
www.krewi.de

